

242mm



Sugclean

DETERGENTES PROFISSIONAIS DESINCRUSTANTES ÁCIDO

- NÃO ESPUMANTE • DETERGENTE CONCENTRADO
- DISSOLVE MATERIAL ORGÂNICO • PREVINE ENTUPIMENTOS
- LIMPA, ELIMINANDO RESÍDUOS DEPOSITADOS NAS MANGUEIRAS E NOS SEPARADORES DE DETRITOS

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO



**PERIGO: CAUSA QUEIMADURAS GRAVES
CONTÉM PRODUTO FORTEMENTE ÁCIDO
(ÁCIDO FOSFÓRICO).**

conteúdo 1L

**PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL
PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO**



Modo de usar: Adicione 30 mL de **SUGCLEAN** em 1 Litro de água. Aspire a solução com a máxima potência dos sugadores e hemossuctores e também jogue o líquido na unidade auxiliar. Aspire 1 Litro em cada limpeza do consultório diariamente. Para iniciar a limpeza com **SUGCLEAN**, sugerimos adicionar 60 mL do produto concentrado em 1 Litro de água durante os primeiros 5 dias, a fim de remover resíduos acumulados.

Para melhores resultados: Use diariamente. **SUGCLEAN** dissolve debris sólidos nos tubos e no filtro do sifão da cadeira. Caso haja entupimento, use 60 mL de **SUGCLEAN** para cada Litro de água.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Precauções: CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Utilize luvas de borracha e proteja os olhos durante a aplicação. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. Recomenda-se o uso de óculos e luvas de proteção ao abrir a embalagem. Armazenar o frasco em temperatura ambiente (entre 15 °C e 30 °C). Em caso de contato com os olhos ou pele lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito, consulte imediatamente um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Sempre que possível leve o rótulo ou embalagem do produto.

Centro de Controle de Intoxicações do Rio de Janeiro - Tel: 21-2573-3244

Composição:

Princípio Ativo: Ácido Fosfórico 13,6%

Excipientes: Álcool Isopropílico, Acidulante, Corante e Espessante.

Fabricado por: RZK Química do Brasil Ltda.

Estrada Santa Maria, 2.541 - Campo Grande - Rio de Janeiro, CNPJ nº 01.808.863/0001-52 - Indústria Brasileira

Química responsável: Priscila Mércia Gomes CRQ-III 03422430 - Autorização de Funcionamento: 3.02.039-4

Registro MS Nº: 3.2039.0068

Distribuído com exclusividade por:



Estrada do Guereanguê, 2059 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CEP 22713-002 - C.N.P.J. 33.112.665/0001-46

SAC: 0800 602 68 80 - Fax: 21-3342-4009 - www.dfl.com.br - sac@dfl.com.br - Indústria Brasileira

Farm. Resp.: Dr. Evaldo R. de Oliveira CRF-RJ Nº 2897



Rev. 6

90mm

 PANTONE 186 C

 BLACK

 PANTONE 152 C

 Faca de corte